

PHILIPS

RESPIRONICS

DreamMapper

App Philips DreamMapper

para smartphones e tablets


Baixar e configurar a conta de usuário

1. Faça o *download* e comece

- a)  Baixe o app gratuito DreamMapper na iTunes Store ou na Google Play Store, em seu *tablet* ou *smartphone*.



- b) Abra o app e autorize o DreamMapper a enviar notificações.

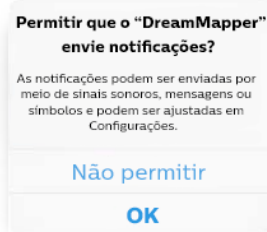

- c) Selecione seu país de residência e salve suas informações.



2. Crie uma conta de usuário

- a) Insira seu nome, sobrenome e endereço de e-mail nos respectivos campos.
- b) Escolha uma senha pessoal com base nos requisitos.

Bem-vindo!

Criar uma nova conta

Nome

Sobrenome

Alemanha

Endereço de e-mail (obrigatório)

Confirmação do endereço de e-mail (obrigatório)

Senha (obrigatório)

Confirmação da senha (obrigatório)

Bem-vindo.

Requisitos de senha

- As senhas devem conter entre 8 e 20 caracteres.
- As senhas devem conter pelo menos três dos seguintes:
 - Caractere maiúsculo
 - Caractere minúsculo
 - Número
 - Caractere especial (por exemplo, #5%&)
- As senhas não podem incluir seu endereço de e-mail ou a palavra "senha".

- c) Insira o número de série de seu dispositivo de terapia do sono (número de 13 dígitos abaixo do código de barras). Você também pode escanear o número de série por meio do app.

Basta clicar em “Escanear” para abrir o recurso de câmera. Aponte a câmera para o código de barras na parte inferior de seu dispositivo de terapia do sono. O número de série será escaneado automaticamente e inserido no campo correspondente.

Bem-vindo!

Verificando seu dispositivo

ATENÇÃO: Se o seu dispositivo de terapia do sono for equipado com um umidificador, certifique-se de remover a câmara de água antes de prosseguir.

O número de série pode ser encontrado na parte inferior do dispositivo.

Bem-vindo!

Confirmação do endereço de e-mail (obrigatório)

ATENCIÓN: Asegúrese de que el humidificador esté vacío antes de voltear el dispositivo.

Número de série do dispositivo (obrigatório) **Varredura**

Eu gostaria de receber informações sobre novidades, produtos e promoções da Philip

Registrar-se **Cancelar**

Se você quiser receber informações sobre os produtos e promoções da Philips, clique no botão ao lado, que ficará verde. Este serviço é opcional.

Em seguida, clique em **Fazer Cadastro**.

- d) Confirme que você leu o contrato de licença do usuário final e o comunicado sobre proteção de dados.
- e) Clique em *Aceitar* se você concorda com o contrato do usuário do DreamMapper.

Bem-vindo!

Contrato de Licença de Usuário Final,
Alemanha – Declaração de Privacidade

Contrato de Licença de Usuário Final, Alemanha

ATENÇÃO - LEIA ATENTAMENTE OS TERMOS E CONDIÇÕES A SEGUIR ANTES DE ACESSAR OU USAR ESTE APLICATIVO.

Para aceitar a declaração de privacidade toque no botão

Aceitar **Recusar**

[Clique aqui para confirmar o comunicado](#)

sobre proteção de dados.


- f) Uma vez criada sua conta de usuário no DreamMapper, a seguinte janela instantânea aparecerá. Clique em *Sim* se quiser parear seu dispositivo de terapia do sono com seu *smartphone* ou *tablet* via Bluetooth.

Deseja que o DreamMapper transfira seus dados referentes à terapia para este dispositivo móvel via Bluetooth?


Não **Sim**

3. Pareie o DreamStation com seu *smartphone/tablet* via Bluetooth.

- a) Siga as instruções no manual de Bluetooth do DreamMapper (veja abaixo).
- b) Verifique se o recurso Bluetooth está ativado em seu *smartphone* ou *tablet*.

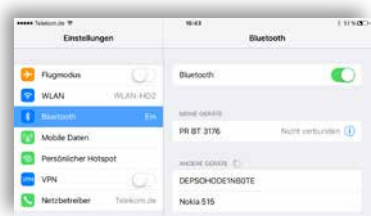

Exemplo:
Configurações do
Bluetooth no menu
do iPhone/iPad

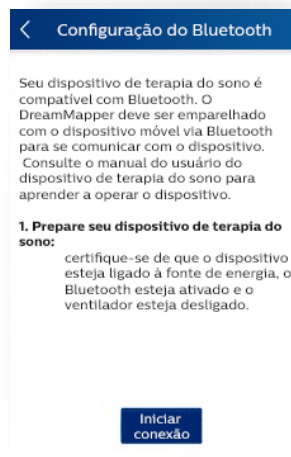

- c) Quando solicitado a parear um dispositivo Bluetooth, confirme selecionando a opção *Sim* e aperte o botão do DreamStation.

Com isso, o pareamento do DreamStation com seu *smartphone/tablet* será concluído.



Pode ser que você também receba uma solicitação semelhante em seu *smartphone/tablet*, perguntando se gostaria de parear um dispositivo Bluetooth.

Atenção: Quando uma solicitação para parear um dispositivo aparecer, deve ser confirmada dentro de cinco segundos. Caso contrário, a tentativa de pareamento será cancelada e o processo terá de ser reiniciado.

- d) Uma vez que uma conexão Bluetooth tenha sido estabelecida, o DreamMapper recuperará os dados de seu DreamStation. Após a conclusão desta etapa, você pode começar a usar o DreamMapper.

Aviso: O app mostrará somente os dados da terapia do sono a partir da data de criação de sua conta de usuário no DreamMapper. Os dados anteriores não poderão ser recuperados.

